

# Ovitrelle<sup>®</sup> Voorgevulde pen

## Gebruiksaanwijzing

250 microgram





# Inhoud



Hoe moet de Ovitrelle® voorgevulde pen worden gebruikt?

Voordat u uw Ovitrelle® pen gaat gebruiken

Uw Ovitrelle® pen klaarmaken voor een injectie

De dosis instellen op 250

De dosis injecteren

Na de injectie

Hoe bewaart u Ovitrelle®?

Aantekeningen







# Hoe moet de Ovitrelle® voorgevulde pen worden gebruikt?



Lees voordat u begint met het gebruik van uw voorgevulde pen deze instructies eerst helemaal tot het eind door. Volg de procedure precies, want deze kan verschillen van wat u gewend bent.



Gebruik deze pen alleen voor uzelf – laat niemand anders hem gebruiken.



Injecteer Ovitrelle® zoals uw arts of verpleegkundige u geleerd heeft.



De pen is uitsluitend voor onderhuidse injectie.



Deze pen is uitsluitend voor eenmalig gebruik.





# Voordat u uw voorgevulde pen gaat gebruiken



Was uw handen met water en zeep.




Zoek een schone plaats en een vlak oppervlak op.



Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket van de pen.



Verzamel alle spullen die u wat u nodig hebt en leg ze het klaar:  
alcoholdoekjes / de voorgevulde pen / een naald.

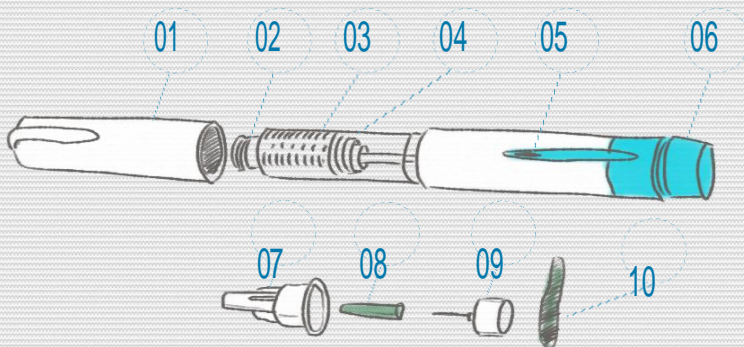

- 1 dop van de pen
- 2 naaldaansluiting met

- 3 schroefdraad  
reservoirhouder

- 4 plunjerzuiger
- 5 dosisweergave





6 dosisinstellingsknop

7 buitendop naald


8 binnenbescherming  
naald

9 verwijderbare naald

10 verzegeling

# Uw voorgevulde pen klaarmaken voor injectie

VERWIJDER DE DOP VAN DE PEN

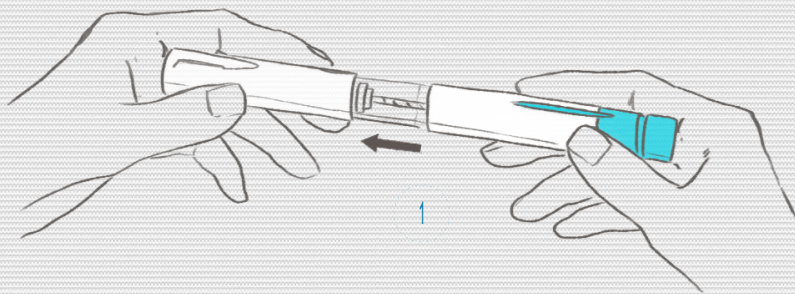


## MAAK UW NAALDKLAAR VOOR INJECTIE

- Neem een nieuwe naald - gebruik uitsluitend de meegeleverde naalden "voor eenmalig gebruik".
- Houd de buitendop van de naald stevig vast.
- Controleer of de verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los zit.
- Verwijder de verzegeling.


**LET OP:** Als de verzegeling beschadigd is of los zit, mag u de naald niet gebruiken. Gooi de naald weg in een container voor scherp afval. Vraag uw arts of apotheker hoe u een nieuwe naald kunt krijgen.

2

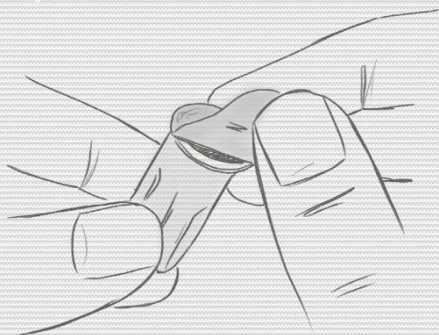





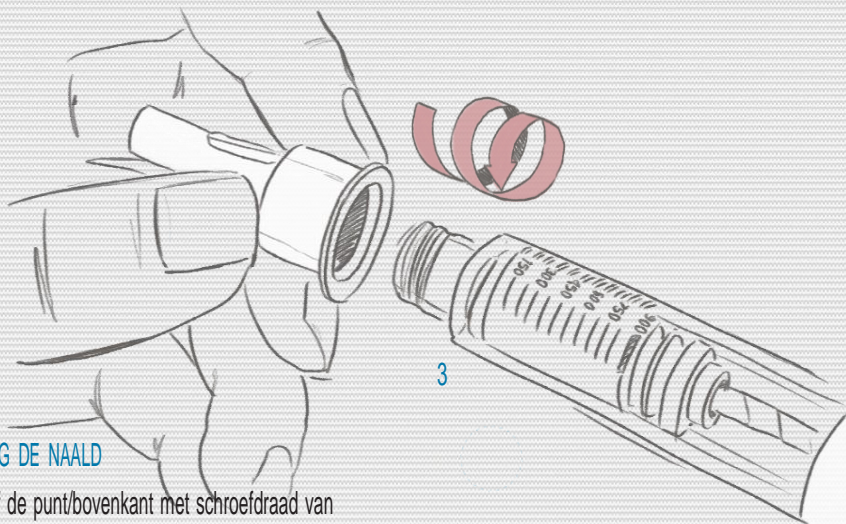

### BEVESTIG DE NAALD


- Schroef de punt/bovenkant met schroefdraad van de Ovitrelle® voorgevulde pen in de buitendop van de naald totdat u een lichte weerstand voelt.
- Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken..

Bewaar deze om later weer te gebruiken.

**LET OP:** Bevestig de naald niet te strak;  
daardoor kan de naald na de injectie  
moeilijk te verwijderen zijn.


- Houd de Ovitrelle® voorgevulde pen vast met de naald omhoog gericht.
- Verwijder de groene binnenbescherming voorzichtig en gooi deze weg.

4

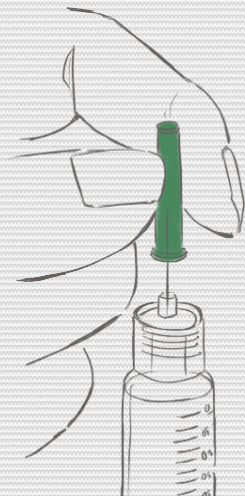





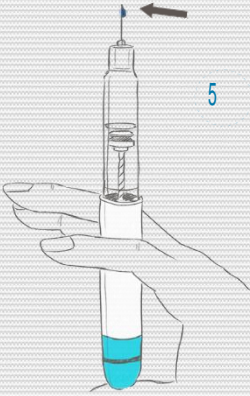

KIJK GOED NAAR DE PUNT  
VAN DE NAALD OF ER KLEINE  
DRUPPELTJES VLOEISTOF ZIJN




- Als u kleine druppeltjes vloeistof ziet, gaat u verder bij hoofdstuk 'De dosis instellen op 250.'



**LETOP:** Als u geen kleine druppeltjes op of vlak bij de punt van de naald ziet, moet u de stappen op de volgende pagina uitvoeren.

### ALS U GEEN KLEINE DRUPPELTJES VLOEISTOF OP OF VLAK BIJ DE PUNT ZIET:

- 1 Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtersom totdat u een stip (•) in de dosisweergave ziet staan. Als u deze positie voorbij bent gegaan, draait u de dosisinstellingsknop gewoon terug tot aan de stip (•).
- 2 Houd de pen vast met de naald omhoog gericht.
- 3 Tik zacht tegen de reservoirhouder.
- 4 Duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in. Er verschijnt een druppeltje vloeistof aan de punt van de naald; dit laat zien dat uw voorgevulde pen klaar is voor de injectie.
- 5 Als u geen vloeistof ziet, kunt u het een tweede keer proberen (u mag dit maximaal twee keer doen) en start u vanaf stap 1 hierboven.

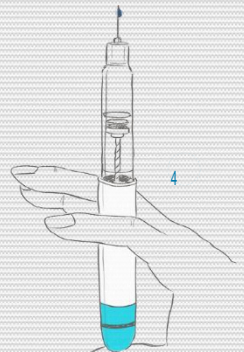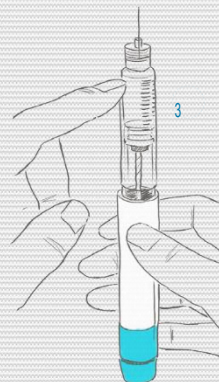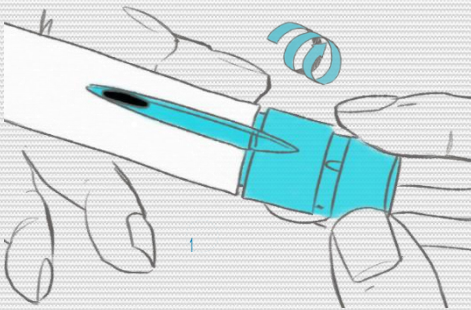






# De dosis instellen op "250"

## STEL DE DOSIS IN

Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom. Op de dosisweergave ziet u een rechte lijn en u moet blijven draaien totdat u het getal "250" kunt aflezen.

Duw of trek niet aan de dosisinstellingsknop terwijl u eraan draait.

De dosisweergave behoort "250" te tonen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

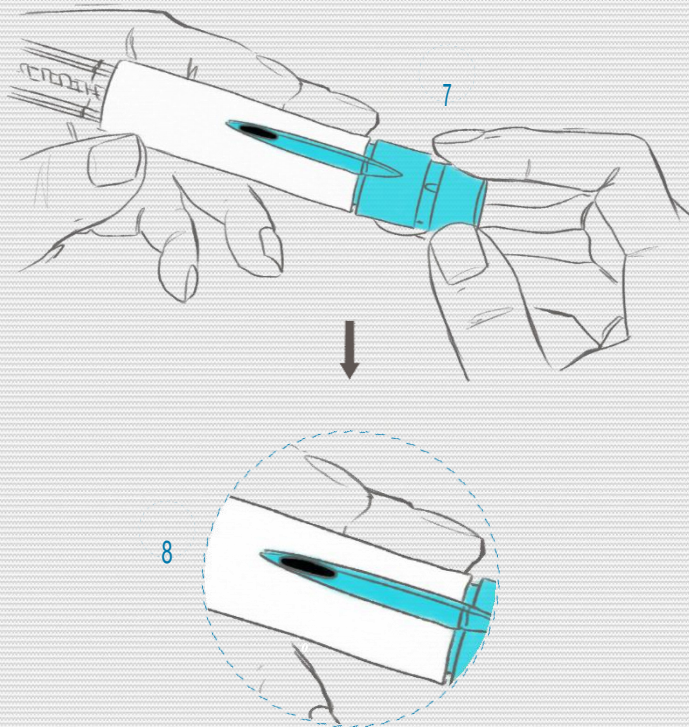





# De dosis injecteren



1 Kies een injectieplaats in het gebied dat uw arts of verpleegkundige u heeft aangegeven voor de injectie.

2 Reinig de huid op de injectieplaats door deze met een alcoholdoekje schoon te vegen.


3 Controleer opnieuw of het getal in de dosisweergave '250' is. Is dit niet het geval, dan moet u deze aanpassen. (zie hoofdstuk 'De dosis instellen op 250')

Injecteer de dosis volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige.

- Duw de naald langzaam volledig in de huid.
- Duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in zoals op de onderstaande afbeelding wordt getoond.
- Houd de dosisinstellingsknop ten minste 5 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis injecteert
- Trek na ten minste 5 seconden de naald uit de huid terwijl u de dosisinstellingsknop ingedrukt houdt.
- Het getal dat de dosis aangeeft in de dosisweergave springt weer terug op '0'. Dit geeft aan dat de volledige dosis is afgegeven.
- Laat de dosisinstellingsknop los.

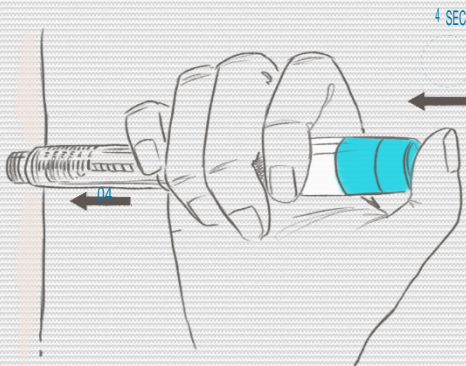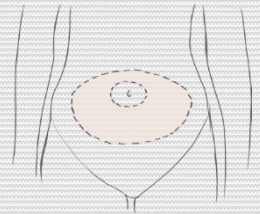

**!**  
Na 5 seconden blijft u de dosisinstellingsknop ingedrukt houden en trekt u de naald uit de huid.

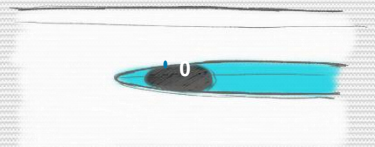





# Na de injectie




## CONTROLLEREN OF U EEN VOLLEDIGE INJECTIE HEBT GEGEVEN

- Controleer of de dosisweergave 0 aangeeft.
- Dit bevestigt dat de dosis volledig is geïnjecteerd. Probeer niet een tweede keer te injecteren.
- Als de dosisweergave niet '0' aangeeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## DE NAAID VAN DE PEN VERWIJDEREN

- Houd de voorgevulde pen stevig aan de reservoirhouder vast.
- Zet voorzichtig de buitendop van de naald op de naald.

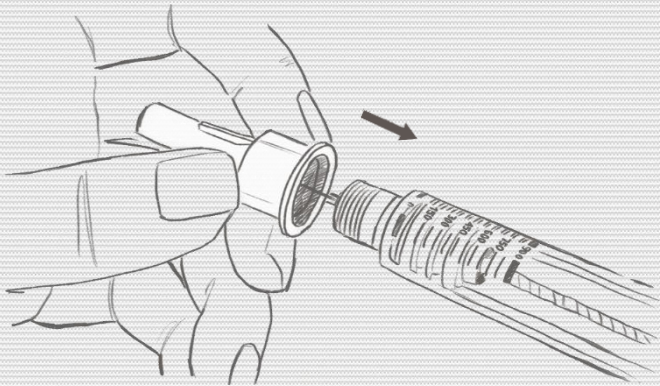







Pak dan de buitendop van de naald vast en schroef de naald los.

- Zorg dat u zichzelf niet met de naald prikt.
- Zet nu de dop weer op de pen.

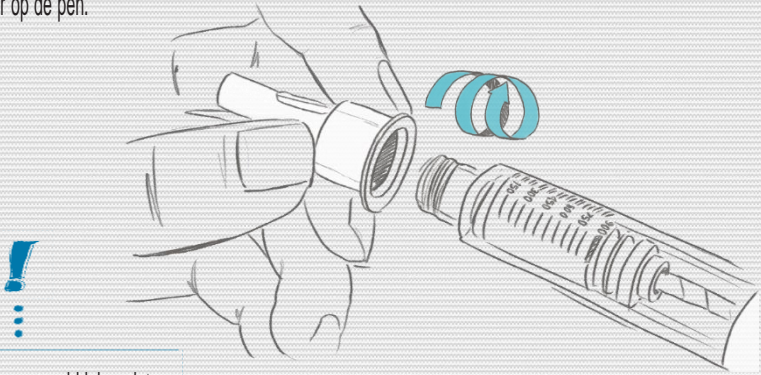

**LET OP:** Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

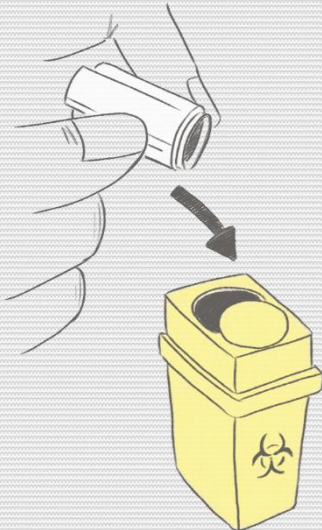

### GOOI GEBRUIKTE PENNEN EN NAALDEN WEG

- Gebruik elke naald en pen slechts eenmaal.
- Als u uw injectie voltooid hebt, moet u de gebruikte naald op een veilige manier afvoeren en de pen weggooien.
- U kunt de pen het best terugdoen in de oorspronkelijke verpakking.
- Wanneer de pen leeg is, vraag uw apotheker wat u ermee moet doen.









# Hoe bewaart u de voorgevulde pen?



Bewaar de pen op een veilige plaats. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.



Gebruik Ovitrelle® niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP.

Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.



Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren.



Gebruik Ovitrelle® niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof deeltjes bevat of niet helder is.



De inhoud van deze gehele brochure is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing 12/2016 en de patiëntenbijsluiter 12/2016 van Ovitrelle®



aantekeningen





